


Luminous Pro-Series

TECNOLOGÍA LED ROJA PATENTADA

Ilumina el tejido blando y el flujo sanguíneo de la mama estableciendo una línea de base específica del paciente para identificar cambios o posibles anomalías.



Las áreas caracterizadas por oscuridad visual o sombras pueden ser una indicación de posibles anomalías.

La transiluminación mamaria es una técnica NO invasiva que permite visualizar con un dispositivo médico de bajo riesgo clase I el patrón venoso de las mamas.

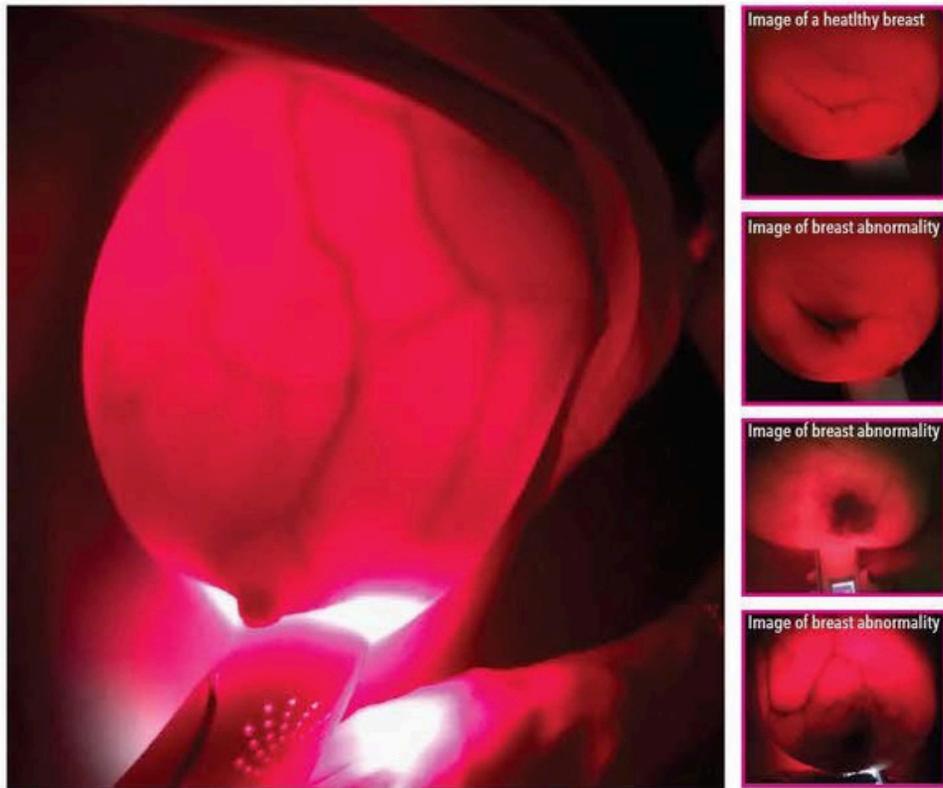

IMÁGENES DE UNA
MAMA SANA

IMÁGENES DE UNA
MAMA CON ANOMALÍAS

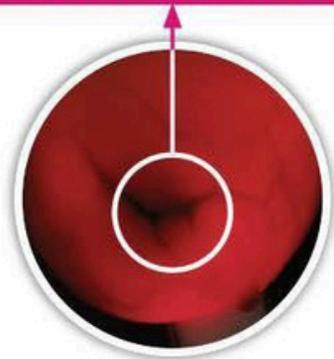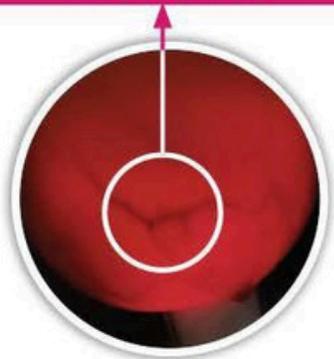

Luminous Pro-Series

Contiene una luz led infrarroja que se adhiere al tejido mamario, absorbiendo la hemoglobina

Objetivo del Examen de Transiluminación mamaria con Luminous Pro-Series
Complementar el examen clínico de mamas realizado por el profesional de salud.

Sobre el lugar donde se realiza la prueba:


Debe ser un consultorio/cuarto oscuro donde no ingrese luz solar o eléctrica

MODO DE USO POR EL PROFESIONAL DE SALUD

Se coloca a la paciente de pie con las manos detrás de la cabeza (nuca) similar al ECM.

Colocaremos el dispositivo médico Luminous Pro-Series en las mamas con la luna pegada a la mama derecha, separando mentalmente la mama en 4 Cuadrantes.

Byer/Shainberg/Galliano *Dimensions Of Human Sexuality*, 5e. Copyright © 1998. The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

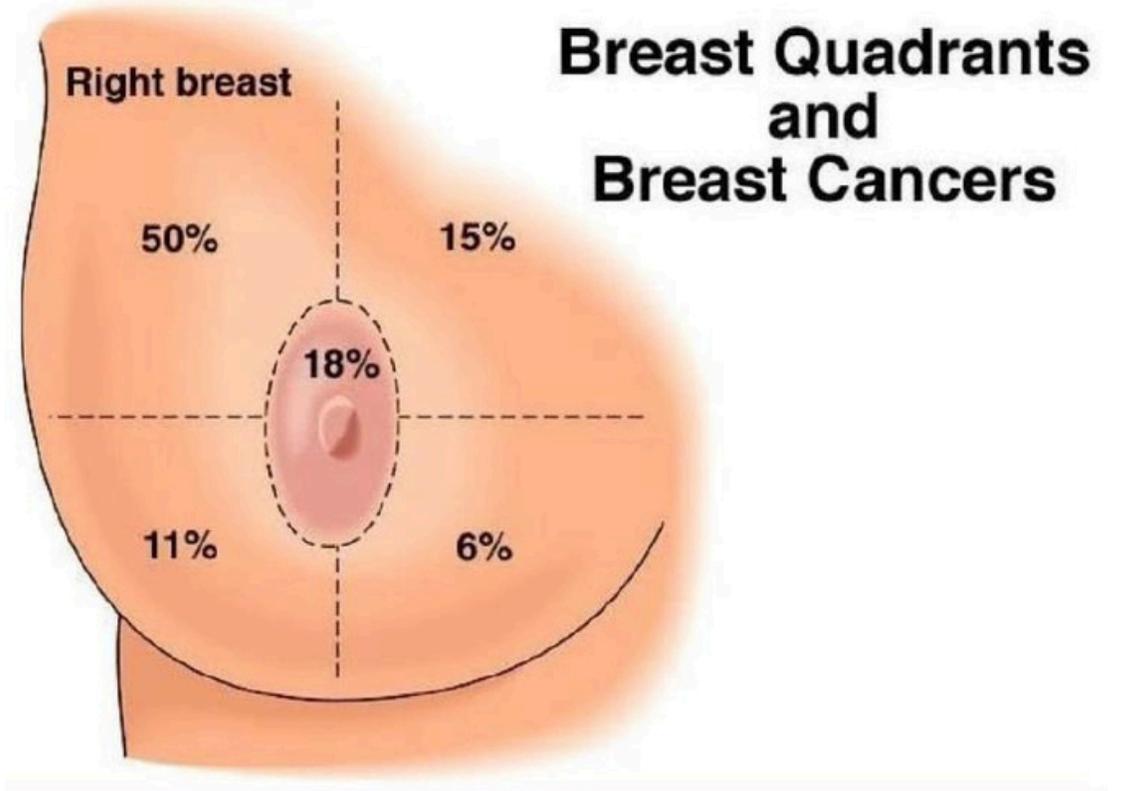

MODO DE USO POR EL PROFESIONAL DE SALUD

- Empezamos por el Cuadrante Superior Externo y tamizamos hasta la cola de Spencer (extremo axilar).
- Seguido se tamizara el Cuadrante Superior interno, bajando al Cuadrante inferior interno y externo.
- Finalizamos colocando el Luminous Pro-Series debajo del pezón donde tendremos una visión total de las mamas.

RESULTADOS

- Las mamas sin angiogenesis se verán como luz roja brillante con vasos sanguíneos regulares.
- Las mamas con alguna sospecha de patología se verán con manchas oscuras irregulares.
- Diagnóstico Pre clínico.
- Se sugiere a todo paciente que presente cualquier resultado de patrón venoso anormal referir a Ecografía y/o Mamografía.